


Инструкции по использованию индукционной петли VERT-1 «Индикатор»

Индукционная портативная система VERT-1 «Индикатор» — это переносное устройство, которое обеспечивает усиление и трансляцию звуковой информации в зоне получения услуг людям с нарушениями слуха, использующим слуховые аппараты или кохлеарные имплантаты. Такие устройства нужно устанавливать в общественных местах и зонах обслуживания населения согласно п. 8.1.10 СП 59.13330.

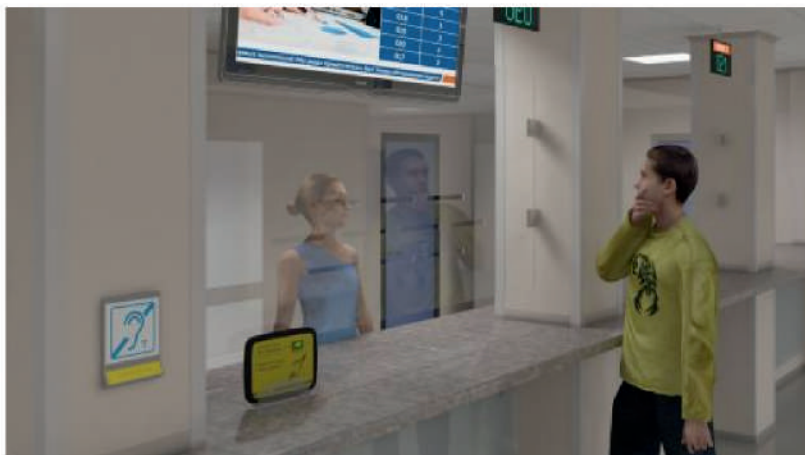

Главной особенностью портативной системы VERT-1 «Индикатор», соответствующей ГОСТ Р 51671, является дисплей с цифровой индикацией.

Из чего состоит индукционная система?

Данная модель представляет собой небольшое пластиковое устройство размерами 23 x 32 x 3,5 см со встроенной индукционной петлей, высокочувствительным микрофоном и аккумулятором с возможностью непрерывной работы в течение 4 часов.



Открыв коробку, вы увидите следующую комплектацию индукционного оборудования:

- Паспорт изделия
- Пиктограмму доступности помещения
- Непосредственно саму индукционную систему VERT-1 «Индикатор»
- Блок питания 220 В
- Сборная подставка для устройства

Благодаря усилению звука данное изделие помогает людям с ограничениями по слуху получать необходимую информацию без внешних помех.

Технические характеристики системы

Устройство VERT-1 «Индикатор» оснащено дисплеем с цифровой индикацией, который располагается на передней панели изделия. На дисплее отображается уровень заряда аккумулятора и напряжение аккумуляторной батареи.

Компактная система VERT-1 «Индикатор» не занимает много места на рабочем столе в зоне обслуживания и имеет отличные эксплуатационные характеристики:

- Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ
- Максимальная выходная мощность: 7 Вт
- Автономная работа без подзарядки: 4 ч
- Встроенный Ni-MH аккумулятор: 12 В
Степень защиты: IP 54
- Диапазон рабочих температур: от 0°C до -40°C
- Диапазон температур для транспортировки: -20°C .. +40°C
- Площадь покрытия: 1,2 м²
- Внешний блок питания: AC 220 В - DC 15 В, 1 А
- Цвет: чёрный/жёлтый
- Материал корпуса: пластик
- Вес изделия: 1,5 кг



С помощью встроенного микрофона с чувствительностью от -60 до -3 дБ, устройство передаёт ваш голос чётко и громко. Система оснащена встроенным аккумулятором с автономной работой до 4 часов без подзарядки.



Площадь покрытия индукционного поля составляет 1,2 м² — это довольно хорошие показатели для такого малогабаритного устройства. Такой площади более, чем достаточно, чтобы охватить зону получения услуг и проработать это время при интенсивном использовании.

Сборка

Индукционная петля VERT-1 «Индикатор» поставляется в собранном виде. Из составных частей необходимо собрать только подставку и поместить в неё устройство.



Затем необходимо подключить к портативной системе кабель питания. Гнездо для кабеля располагается на задней панели изделия. Включение системы осуществляется нажатием соответствующей кнопки. На этом всё, устройство полностью готово к использованию без дополнительных настроек.

Как пользоваться индукционной системой?

При непосредственном использовании портативной системы Vert-1 «Индикатор» нужно повернуть изделие передней панелью к собеседнику и включить. Горящий зелёный индикатор на дисплее информирует о начале работы системы.

В общественных местах, зонах обслуживания и получения информации, где уровень шума достаточно высокий, людям с ослабленным слухом при наличии слуховых аппаратов сложно получать информацию без искажений. Индукционная система VERT-1 «Индикатор» оснащена встроенным высокочувствительным микрофоном и поможет воспринимать информацию правильно.



Панель управления данной модели индукционной системы, как и гнездо для подключения кабеля, расположена на задней панели устройства, а именно: кнопки включения и выключения, индикатор включения и выключения питания.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

☎ 8 800 555-34-73



Инструкция по использованию индукционной петли VERT-1 «Индикатор»